

企業さま用

簡単! ストレスの客観的評価!



ストレスホルモン量 検査キット

コルチゾール

従業員の

数 値 化

ストレス見える化 してみませんか?

ご利用用途


- 企業のストレスチェックの一環としてのご利用
- 産業医の先生の新たなツール
- アンケート式のストレスチェック+客観的評価で、より精度の高いストレスマネジメントのご提案

髪



爪

もしくは

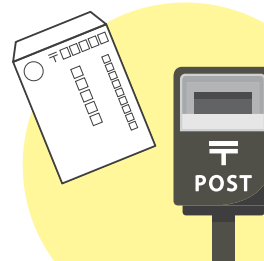

簡単!

[髪の毛][爪]を
切って・貼って・送るだけ!

約2~3週間で検査結果を
メールでお返しします



※特定の疾病の診断をするものではありません。疾病の診断については、医師の侵奪・指導を優先してください。
※糖尿病、妊娠中の方、ホルモン製剤、グルココルチコイド系薬剤投与中の方は数値が高く出る可能性があります。

当キット(髪や爪)で測定するメリット

- ① アンケート形式のストレスチェック(主観評価)に生体情報(客観的評価)を加えて、より精度を高めたストレスマネジメントが可能
- ② 日内変動や急性ストレスの影響を受けず、慢性的なストレスホルモン量が見える

従来のホルモン測定




測定時の数値を反映 ※日内変動あり

非侵襲性検体



一定期間平均的な数値を反映
=慢性ストレス ※日内変動なし

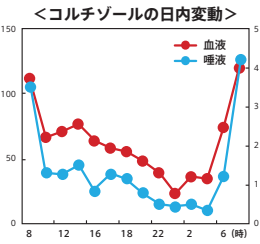

コルチゾールは日内変動に加え、急性ストレスにより変動しやすい



- [キット内容物]
- ・説明書
 - ・検体貼付台紙
 - ・チャック付きポリ袋
 - ・返送用封筒



臨床試験成績

[試験方法]

- 液体クロマトグラフィー・タンデム型質量分析(LC-MS/MS)法により毛髪コルチゾール値を測定した。

[レベル評価]

- 当社独自の調査・研究に基づきレベルを評価した。
- レベルは測定結果を最小値から最大値まで順に並べ、25%ずつ4段階に分け、レベル1~4と設定した。
- なお、性別により数値評価が異なるため、性別に分けた結果で表示している。

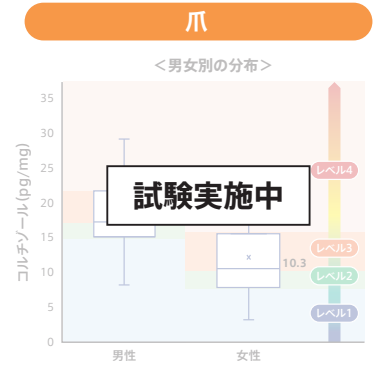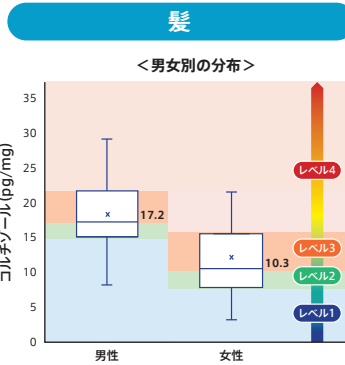

測定結果が届くまで

1

検体採取

対象者自身で検体を採取

髪

後頭部より3cm以上の髪の毛を頭皮に近い部分でハサミで切り、10~15本切る

- 根元から抜く必要はありません。
- 長さが3cmない場合には15本以上切る
- 後頭部の髪の毛がない場合は、できるだけ後頭部に近い部分を切る

爪

1週間程度伸ばした両手の親指の爪を切る

- 採取の前に手を洗い、水気をよく拭き取ってください。
- 他の指や足の爪では正しく測定できません。



2

検体送付

検体をチャック付きのポリ袋へ入れ、封筒に封入し、ポストに投函

髪

台紙に貼付



爪

チャック付きポリ袋に封入



返信用封筒に封入



投函



3

結果確認

約2~3週間後、検査結果レポートが対象者へメールで届きます。

- ご本人の同意を取得することで、企業様へお届けすることも可能です。



【ご確認ください】

- ※当社独自の調査・研究に基づき、リスクレベルを評価いたします。
- ※あくまでも慢性ストレスレベルを評価するもので、診断するものではありません。専門家の指導を優先してください。
- ※毛髪の場合1か月以内にカラーリング(白髪染め含む)、フリーチャーパーマをしている場合、測定値に影響がでる可能性があります。1か月以上経ってからの採取をおすすめします。
- ※糖尿病、妊娠中の方、ホルモン製剤、グルココルチコイド系薬剤投与中の方は数値が高くなる可能性があります。

今より「ちょっと素敵な」未来

男性ホルモン研究所



株式会社あすか製薬メディカル

〒108-8532 東京都港区芝浦2-5-1

【問い合わせ窓口】

MAIL: apmed-helthcare@ap-med.co.jp
TEL: 0120-550-136 FAX: 03-5484-8369
10:00~17:00(土・日・祝を除く)

※ご購入、お見積りのご依頼については、上記メールや電話、FAXにて承っております。

問い合わせ用
二次元コード

